

ANLEITUNG FÜR MUNDSPIEGELPFLEGE ECaktiv, OPTIMA, HR FRONT, CLARIMA, Intraoral Spiegel,

Generell:

1) **Mundspiegel und Mundspiegelgriff immer getrennt desinfizieren und sterilisieren.**

2) **Gerades Eindrehen des Mundspiegelgriffes, damit das Gewinde durch Verkanten nicht beschädigt wird.**

3) **Nach der Sterilisation im Autoklaven bitte immer die Abkühlphase im Autoklaven einhalten, nicht vorher herausnehmen**

Die Spiegel nach der Abkühlphase nicht im Nassen liegen lassen, sondern gleich sorgfältig trocknen, um eingebrannte Wasserflecken zu vermeiden.

**Steriles Wasser: Für den Gebrauch im Autoklaven Steriles Wasser!
Noch besser: Doppelt Steriles Wasser (BIDEEST).**

HR FRONT Mundspiegel: Immer eine gewisse Vorsicht für die Behandlung auf der Glasoberfläche: Es ist eine hauchdünne Beschichtung aufgedampft.

Desinfektion:

kontaminierte Mundspiegel in eine geeignete Desinfektionslösung legen (z.B. „ID 212 forte“, „ BIB forte“ oder „Lysetol FF“)

Wichtig: Unbedingt folgendes beachten:

- 1) Konzentration der Desinfektionslösung gemäß Hinweis des Lösungsmittelherstellers
- 2) Zeitdauer der Desinfektion gemäß Hinweis des Lösungsmittelherstellers

Reinigung: :

1. **Abspülen:** Nach der Desinfektion mit Wasser gut abspülen.
Bei hartnäckigen Verunreinigungen wie z. B. bei Phosphatzementen Empfehlung für „Solvitan“ von VOCO.

2) **Trocknen:** Mundspiegel sehr sorgfältig trocknen.

3) Sterilisation:

Möglich sind Autoklav und Heißluft!

Wichtig: Nur absolut trockene Mundspiegel in den Sterilisator legen, sonst können durch die hohe Hitze Einbrennungen oder Korrosion entstehen.

Nicht möglich: -Sterilisation und Aufbewahrung in Folie

-Ultraschallreinigung

-Thermo-Desinfektor

Temperatur: max. 200° C